

機械器具(30) 結紮器及び縫合器

一般医療機器 持針器 JMDNコード:12726010

## ニードルホルダーMC

### 【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]  
下記の通り



DNH タイプ

SNH タイプ

商品番号	全長
DNH-TC14	14.0 cm
DNH-TC16	16.0 cm
SNH-TC14	14.0 cm
SNH-TC15	15.0 cm

[包装]

1 本 / 包

[原材料]

ステンレススチール (T.C加工)

### 【使用目的又は効果】

縫合時に縫合針を把持する。

### 【使用方法等】

- (1) 使用する前に本品が滅菌済みか確認すること。  
(オートクレーブ滅菌可。121℃で20分間行う。)
- (2) 先端部を開閉し、縫合糸や縫合針を把持する。

### 【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。
- (2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。

- (3) 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- (4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
  - ・ 使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・ 洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
  - ・ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。しばらく使用しない時は防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
  - ・ 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
  - ・ 加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度(乾燥工程も含む)121℃以下厳守。】
  - ・ 水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル  
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号: 076-278-8800

製造業者: MCTBIO (エムシーティーバイオ社)  
製造国: 大韓民国