

**2021 年 6 月改訂(第 3 版)

*2017 年 4 月改訂 (第 2 版、新記載要領に基づく改訂)

届出番号 : 17B2X10001000196

歯科材料 (09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード : 70907000

C i レーズブラシ

* 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

外観は下記のとおり



種類	直径(φ)
ブラシ 1 行	50 mm
ブラシ 2 行	58 mm
ブラシ 3 行	70 mm

2. 原材料

軸部 : 木製 (イチジク木)

ブラシ部 : 豚毛

3. 包装

10 個 / 1 パック

** 【使用目的又は効果】

歯科技工用電気レーズに装着し、補綴物の研磨の為に用いる。

【使用方法等】

- 1) 歯科技工用電気レーズに本品を装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
- 3) 振れ等が無ければ、本品を補綴物に押し当て、研磨する。
※ 使用回転数 : 3000~5000rpm

** 【使用上の注意】

- 1) 口腔内には使用しないこと。
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。
- 4) 植毛部 (ブラシ部) から絶対に毛を抜いたり、加工したりしないこと。
- 5) 本品で研磨作業中に、歯科技工用電気レーズのブラシ装着部からブラシが外れない様に必ず確認してから使用すること。
- 6) 術者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- 7) 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 8) 回転不良・装着時のぶれや装着が緩い場合は、使用をしないこと。
- 9) 使用中に異常音が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。
- 10) 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨剤の種類別に分けて使用すること。
- 11) ブラシ用洗浄液等に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがありますので十分注意すること。
- 12) 損傷、変形 (錆、表面キズ、曲がり、汚染) 等のあるものは使用しないこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 長時間の使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため、安全管理上新しい物と適時交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル

住所 : 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号 : 076-278-8800