

** 2017 年 12 月 改訂(第 3 版)

届出番号:17B2X10001000197

* 2017 年 4 月 改訂(第 2 版、新記載要領に基づく改訂)

歯科材料 (09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード: 70907000

シャインブラシ

*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

種類: ソフトタイプ、レギュラータイプ



型名	全長	ブラシ部φ	シャンク部φ
ソフトタイプ #9	42.5	14	2.35
レギュラータイプ #9	42.5	14	2.35
ソフトタイプ #11	42.5	17	2.35
レギュラータイプ#11	42.5	17	2.35

(単位: mm)

2. 原材料

軸部: スチール Q012

ブラシ部 ソフトタイプ: 灰色ヤギ毛

レギュラータイプ: 馬毛 70%、白色ヤギ毛 30%

3. 包装

12 本 / 箱

【使用目的又は効果】

歯科用電気駆動装置に装着し、補綴物の研磨に用いるブラシ。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 歯科用電気駆動装置に本品を装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
- 3) 振れ等が無ければ、本品を補綴物に軽く押し当て、研磨する。
※最大回転数: 20,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 5) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 6) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- 4) 術者は保護眼鏡を必ず着用すること。
- 5) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- 6) 回転不良・装着時のぶれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 本品は有効期間等を特別定めていないため長時間の使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため、安全管理上新しい物と適時交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号: 076-278-8800