

再使用禁止


オーラルチップ

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 注意事項を厳守の上、使用すること。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

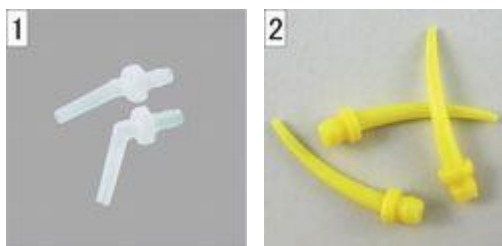

- 1… コアミックスチップ（別売）用
- 2… Ci ミキシングチップイエロー（別売）用

2. 原材料
ポリプロピレン

3. 包装
コアミックスチップ用…50 個/袋
Ci ミキシングチップイエロー用…100 個/袋

【使用目的又は効果】

本品はミキシングチップの先端に取り付け、歯科材料の吐出をするために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) ディスペンサー（別売）に専用カートリッジを取り付ける。
- 2) カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、2 種のペーストが均等に吐出されることを確認する。
- 3) キャップを取り外したカートリッジにミキシングチップ（別売）を取り付け、先端に本品を装着する。（カートリッジとミキシングチップの装着は各ミキシングチップの装着方法に準じ装着する。またミキシングチップの先端に本品を装着する際は、カチッと音がするまで押し込む。）
- 4) ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。特に粘性が高いペーストでは使用するメーカーの指定するミキシングチップの直径のものを使用すること。指定される直径のものより細いものを使用すると破損する場合がある。

- ・装着できるミキシングチップは別途記載のある種類・サイズに適合するが、ミキシングチップ先端内面のバリ等で適合しない場合もある為、カチッと装着音が確認できない場合は使用を中止し、別の新しいミキシングチップにて再度確認してから使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品は単回使用とし、再使用を禁止する。
- 2) 本品に適合しないミキシングチップには使用しないこと。
- 3) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：SeilGlobal Co., Ltd.
（セイルグローバル社）
製造国：大韓民国