

## PHマイクロミラー

### \*\*【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

下記の通り

《ミラートップ》



製品番号	ミラーサイズ(mm)
3303	3
3305	5
3306R	7×2
3310R	9×3

《ミラーハンドル》



《ハンドルり体型》



製品番号	ミラーサイズ(mm)
1303	3
1305	5
1306R	7×2
1310R	9×3

#### 2. 原材料

ステンレススチール

#### 3. 包装

各1個 / 包

### 【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に滅菌済みかどうかを確認する(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守)
- 2) ミラートップは専用のミラーハンドルと接合させる。
- 3) 口腔内を観察・検査する。

### \*\*【使用上の注意】

- 1) 患者ごとに【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件で、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。
- 2) 本品を用いた処理により発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れた患者には、使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- 3) 子供等の診療・治療時においては、開口器等を用いて開口状態を維持すること。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をすおそれがある。

- 4) 破損等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。
  - ・本品に対する曲げ・切削・加工等
  - ・粗雑な扱い(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)
- 5) 薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるので速やかに拭拭すること。
- 6) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し滅菌を行うこと。
- 7) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 8) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### \*\*【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前後は、破損、ヒビ、大きな腐食又はミラー部の曇り等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 使用前にミラー部とハンドル部が確実に装着されているか点検すること。
- 3) 以下の方法及び条件で、患者ごとに、洗浄等の処理を行った上で滅菌すること。

#### 【洗浄】

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

#### 【滅菌】

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

#### 【その他】

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル  
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号: 076-278-8800

製造業者: PRODONT-HOLLIGER (A Company of Acteon Group)  
(プロドント ホリガー社)

製造国: フランス