


＊【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
- 下記の通り

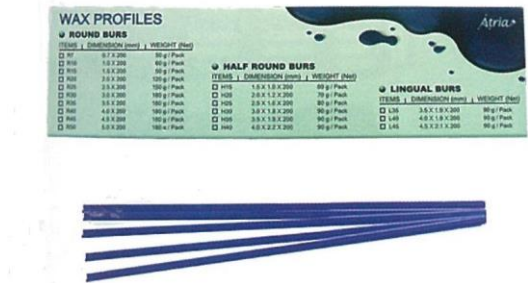

製品番号	タイプ	サイズ
R20	ラウンドバー	2.0×200
R25	ラウンドバー	2.5×200
R40	ラウンドバー	4.0×200
L40	リンガルバー	4.0×1.9×200

（サイズ単位：mm）

2. 包装

- R20：120g / 箱
- R25：150g / 箱
- R40：180g / 箱
- L40：90g / 箱

【使用目的又は効果】

本品はロストワックス法により、義歯用クラスプバー、金属床のろう型、スプール線及び各種ベント用として使用する。

【使用方法等】

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、義歯のバー、クラスプ等の鋳型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

【使用上の注意】

本品は可燃性であるので、使用の際、火気に注意すること。

＊【保管方法及び有効期間等】

【保管】

- 1) 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所、車両内）に放置しないこと。
- 2) 25℃以下の場所で保管すること。
- 3) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 4) 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

【使用期限】

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
（Exp：20YYMMDD は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Atria Co.（アトリア社）
製造国：大韓民国