

*2018 年 1 月改訂（第 3 版）
2017 年 11 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000305

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯面研磨材 JMDN コード：70904000

シャインフロー

*【禁忌・禁止】

本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
性状：ペースト状
フレーバー：ミックスフルーツ、ミント
2. 原材料
軽石、水、グリセリン、シクロヘキサン系ポリマー、その他
3. 包装
1 本（90g） / 箱

【使用目的又は効果】

歯面の研磨、清掃をするために用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 滅菌したブラシ又はカップ（別売）を歯科用ハンドピースに装着する。
- 2) 本品をブラシまたはカップに適量取り（またはペーパーパッドに取り出してから採取し）、歯面研磨を行う。
※最大回転数：2000rpm 以下

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがあるので、規定の回転数を厳守すること。
- 2) ペーストは乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。

*【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。
- 2) 本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
- 3) 万が一、本材が目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医の診察を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

〔有効期間〕

包装に記載されている使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Maquira Indústria de Produtos Odontológicos Ltda
（マキアラ インダストリア デ プロダutos オdontológicos 社）

製造国：ブラジル共和国