

\*\*2021年4月改訂（第4版）

\*2017年5月改訂（第3版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000324

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯磨カップ JMDNコード：16184000

再使用禁止

## LKプロフィーカップ

### 【禁忌・禁止】

1. 本製品に対し発疹などの過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

### 【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

### \*\*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り  
[CAタイプ]

形状			
カラー	ホワイト	イエロー	イエローグリーン
タイプ	セミソフト	ソフト(リブ有)	ソフト(リブ無し)

### 2. 原材料

- ・カップ部：シリコン
- ・軸部：真鍮（ニッケルメッキ）、

### 3. 包装

144個／袋

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用電気駆動装置に取り付け回転させて歯面研磨を行う。

### \*【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 本品に研磨ペーストを適量塗布し、歯面研磨を行う。
- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。  
※回転数は、800～2000rpmで使用すること。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・指定の回転数を超過して使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、本品を確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・使用に関しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- ・使用に関しては、プロフィーカップを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛散することがあるので注意すること。
- ・目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800