

**2023 年 3 月改訂（第 4 版）

*2017 年 11 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000338

機械器具（64）歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ JMDN コード：31848000

MDSY プローブ

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

《ステンレススチールタイプ》



ハンドル径：Φ6mm



ハンドル径：Φ3.5mm

型名	深度スケール (mm)
CP11	3-6-8-11
CP12	3-6-9-12
	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
CP15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
WHO	3.5-5.5-8.5-11.5
スリム CP-C	3-6-9-12

《チタンコーティングタイプ》



ハンドル径：Φ8mm

型名	深度スケール (mm)
CP11	3-6-8-11
CP12	3-6-9-12
CP15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
WHO	3.5-5.5-8.5-11.5

《DLC コーティングタイプ》



ハンドル径：Φ8mm

型名	深度スケール (mm)
CP11	3-6-8-11
CP12	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
CP15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

2. 原材料

ステンレススチール

チタンコーティング、DLC コーティング

3. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

*【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
- 2) 使用する適切な器具の種類を選択する。

- 3) 本品の先端部を歯周ポケット部に挿入し、歯肉辺縁あるいはセメント-エナメル境界からポケット底までの深度をプローブ先端部の目盛りによって読み取る。ポケット深度は、1 本の歯でも一定でないため、通常、1 本の歯の周囲 4～6 点を測定し、記録する。

**【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。また、使用中にこのような症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 3) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるため絶対に行わないこと。
- 4) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 5) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・滅菌上の注意

〔洗浄〕

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Medesy s.r.l.（メデシー社）

製造国：イタリア