

** 2018 年 5 月 改訂（第 5 版）

* 2017 年 5 月 改訂（第 4 版、新記載要領に基づく改訂）


届出番号：17B2X10001000341

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000


クラスパターンWAX

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

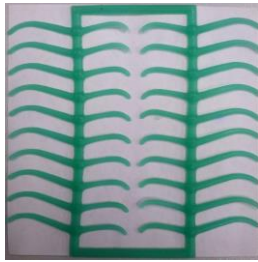

大臼歯用

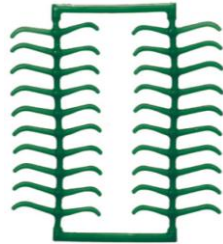

小臼歯用

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

2. 原材料
パラフィン、樹脂、着色料

3. 包装
10 枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は可撤性局部義歯を維持するための器具を作製する場合に用いるためのもので、ワックスで既定の形状に成形されており、鑄造等によって金属に置き換えて使用する。

【使用方法等】

用途にあった本品を選択し、石膏模型又は耐火模型に貼りつけて使用する。

* 【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など）に放置しないこと。
- 3) 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。