


## アクアプレス

### \*【禁忌・禁止】

1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り

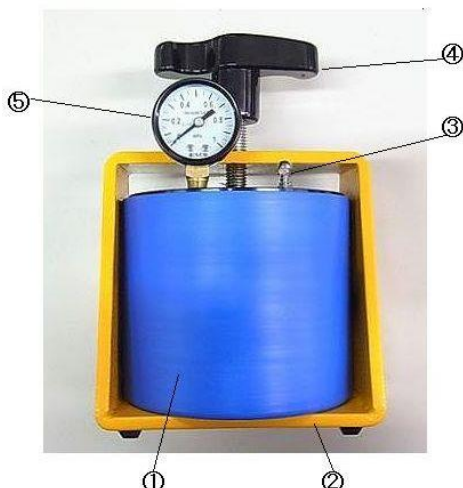

|   |           |
|---|-----------|
| ① | プレッシャーポット |
| ② | フレーム      |
| ③ | 減圧弁       |
| ④ | スクリーハンドル  |
| ⑤ | 加圧ゲージ     |

2. 包装  
1 個 / 箱

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置で、水圧により重合を行う。

### 【使用方法等】

#### 〔使用方法〕

- 1) スクリューハンドルを時計と反対に回してゆるめ、プレッシャーポットを本体から取り出す。
- 2) コンテナに水をすれすれまで満たし蓋を閉める。その際、空気がコンテナ内に入らない様に注意する。
- 3) ハンドルを時計回りに回し、加圧ゲージが 0.4 (MPa) 以上になるようにセットする。(コンテナ内に空気が混入すると加圧がうまくいかないので、もう一度セットしなおすこと)
- 4) 材料の規定の重合時間が経過した後、減圧弁を押して内部の圧力を完全に抜いてから、ハンドルを回し蓋を開ける。

#### 〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 使用中は減圧弁に触れないこと。プレッシャーポット内の水が抜け、重合がうまくいかないことがある。
- 2) 減圧弁を押し、中の圧力を完全に抜いてから蓋をあけること。
- 3) 重合の際は、必ず水を用いること。
- 4) コンテナ縁のゴムが劣化すると、十分な加圧が得られない恐れがあるので、交換すること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：Shin myung Dental co.  
(シンミュン デンタル社)

製造国：大韓民国