


リセラパラフィン WAX

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造 下記の通り

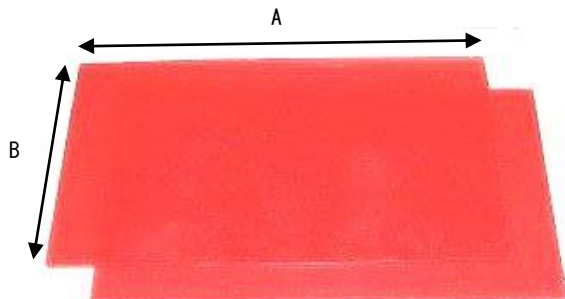

C：厚さ			
タイプ	サイズ (A×B×C)	硬さ	融点
ラージ	170×90×2.2	ミディアム	60℃
		ハード	
レギュラー	145×75×1.6	ミディアム	
		ハード	

(サイズ単位：mm)

2. 原材料

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
カルナバワックス他

3. 包装

ラージタイプ：500g×2 計 1Kg / 箱
レギュラータイプ：250g×4 計 1Kg / 箱

【使用目的又は効果】

本品は主として義歯床の仮床、人口歯の排列などに用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

義歯の仮床

- 1) 本品を作業模型の大きさに合わせてカットする。
- 2) 本品を適度に軟化し、作業模型に圧延する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

人口歯の排列

- 1) 本品を適度に軟化し、巻いて棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- 4) 歯科技工の通法に従い、人口歯を排列する。

ロウ堤の作製

- 1) 本品を適度に軟化し、巻いて棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際、火気に注意すること。
- 2) 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 25℃以下の場所で保管すること。
- 2) 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所、車両内）に放置しないこと。
- 3) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 4) 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

【使用期限】

容器に記載されている LOT は製造日を示す。製造日より 2 年までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
（※例 20YYMMDD は、製造日 20YY 年 MM 月 DD 日を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：上海新世紀齒科材料有限公司

（シャンハイシンセイキシカザイリョウウゲンコウシ社）

製造国：中華人民共和国