

・ 2017 年 2 月改訂（第 4 版）

・ 2016 年 3 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000503

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード：16184000

再使用禁止

LKポリッシングカップ

・【禁忌・禁止】

1. ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止
3. 注意事項を厳守の上、使用すること。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



CA タイプ

カラー	タイプ
ブルー	ミディアム
ピンク	ソフト
グリーン	スーパーソフト

2. 原材料

軸部：真鍮（ニッケルメッキ）

カップ部：合成ゴム

3. 包装

144 個／袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用電気駆動装置に取り付け回転させて歯面研磨を行う。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
- 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
- 3) 研磨ペーストを本品のカップに適量塗布する。

- 4) 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
※回転数は、800～2000 r.p.m. で使用すること。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・ 指定の回転数（800～2000 r.p.m.）を超えて使用しないこと。
- ・ 予め患者の口腔外で回転させて、振れないことを確認すること。
- ・ 使用に関しては無理な力を加えないこと。（無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- ・ 歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ 使用に関しては、プロフィーブラシを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・ 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。

・【使用上の注意】

- 1) ニッケルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本品の使用はディスポーザブルとし、再使用を禁止する。
- 3) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 4) 本品に適合しない歯科用ハンドピースには使用しないこと。
- 5) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

・【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800