

\*\* 2017年12月改訂（第5版）

\* 2017年7月改訂（第4版）

届出番号：17B2X10001000516

歯科材料（07） 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストワックス JMDNコード：16189000

## キャストワックス

### 【禁忌・禁止】

- 1) 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- 2) 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。

### \* 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



2. 原材料  
パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、  
着色材

3. 包装  
直径φ1.0～1.5タイプ：50g / 箱  
直径φ2.0～5.0タイプ：100g / 箱

### 【使用目的又は効果】

本品はロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

### 【使用方法等】

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、義歯のバー、クラスプ等の鑄型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

### 【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

### \* 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など）に放置しないこと。
- 3) 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 4) 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

#### 【使用期限】

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

（※例 20YYMMDD は、使用期限 20YY年MM月DD日を示す）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：上海新世紀歯科材料有限公司

（シャンハイシンセイキシカザイリョウユウゲンコウシ社）

製造国：中華人民共和国