

**2018 年 12 月改訂（第 6 版）

届出番号：17B2X10001000532

*2018 年 1 月改訂（第 5 版）

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN コード：70893000

パーフェクトワックスBK

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



シートサイズ：90 mm×183 mm
融点：62-64℃

2. 原材料
パラフィン、着色材

【使用期限】

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
(Exp. Date: MM/20YY は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Bilkim Tibbi Urunler San.ve Tic.
(ビルクム ティベ ウルンレ 社)
製造国：トルコ共和国

【使用目的又は効果】

本品は主として義歯床の仮床、人工歯の排列などに用いる。

*【使用方法等】

義歯の仮床

- 1) 本品を作業模型の大きさに合わせてカットする。
- 2) 本品を適度に軟化し、作業模型に圧延する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

人工歯の排列

- 1) 本品を適度に軟化し、巻き棒状にする。
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、義歯の仮床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。
- 4) 歯科技工の通法に従い、人工歯を排列する。

ロウ堤の作製

- 1) 本品を適度に軟化し、巻き棒状にする
- 2) 棒状にしたワックスを馬蹄形に曲げ、基礎床に圧接する。
- 3) 過不足部分を削除又は追加し、形状を整える。

【使用上の注意】

- 1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 本品は可燃性であるので、使用の際、火気に注意すること。
- 3) 本品は本来の用途以外には使用しないこと。
- 4) 溶解した本品を直接人体に使用しないこと。
- 5) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 25℃以下の場所で保管すること。
- ・ 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・ 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。