

** 2018 年 7 月改訂（第 4 版）
* 2017 年 9 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000534

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

スプルーワックスBK

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



色調：ブルー、グリーン
直径：2.0 mm、4.0 mm
融点：66-68℃

2. 原材料
パラフィン、着色材

3. 包装
250g / 箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製用に用いる。

【使用方法等】

歯科技工のロストワックス法の通法に従い、鋳型用ろう型を制作する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する

【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

[使用期限]

- ・本品に記載された使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
（Exp. Date：MM/20YY は使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Bilkim Tibbi Urunler San.ve Tic.
（ビルキム ティベ° ウルンレ° 社）
製造国：トルコ共和国