

ディッピングワックスBK

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



イエロー
レッド

融点：62-64℃

2. 原材料

パラフィン、セレスシン（白色ワックス）、着色材

3. 包装

750g / 箱

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

ワックスポットで溶かして使用する。（使用するポットによって設定温度の表示が違う場合があるので、適宜調整する。）

【使用上の注意】

- 1) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

【使用期限】

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

（20YY. MM は使用期限 20YY 年 MM 月末日を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Bilkim Tibbi Urunler San.ve Tic.

（ビルキム ティビ ウルンスラー社）

製造国：トルコ共和国