

\*\* 2018年2月改訂(第4版)

届出番号: 17B2X10001000543

\* 2017年11月改訂(第3版、新記載要領に基づく改訂)

機械器具(66) 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成へら JMDNコード: 38530000

## アルジネートスパチュラ

### \*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造  
下記の通り



全長: 225mm

### 2. 原材料

本体: ステンレススチール  
ハンドル部: 木

### 3. 包装

1本 / 包

### 【使用目的又は効果】

印象材、石膏等の練和に使用する。

### 【使用方法等】

印象材、石膏等の練和に使用する。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄(使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し)・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 4) 洗浄・滅菌上の注意  
[洗浄]
  - ・ 持ち手部分を木製にしている為、オートクレーブ等の高温を伴う処理は行わないこと。
  - ・ 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。  
※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。  
※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。  
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル  
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号: 076-278-8800

### 製造業者:

Hangzhou ZhongRun Medical Instrument Co., Ltd  
(ハンゾウ ゾンルン メディカル インスツルメント社)  
Hangzhou ZhongRun Medical Instrument Co., Ltd Yuhang Branch  
(ハンゾウ ゾンルン メディカル インスツルメント  
ユハン ブランチ社)  
製造国: 中華人民共和国