

**2019 年 1 月改訂（第 4 版）

*2018 年 10 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000544

歯科材料（07）歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス JMDN コード：16189000

CAD・CAMワックスBK

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

ユニバーサルタイプ




厚み	直径
14 mm	98 mm
16 mm	
18 mm	
20 mm	
25 mm	

A/Gタイプ



厚み	直径
16 mm	100.6 mm
18 mm	
20 mm	

Z/Zタイプ

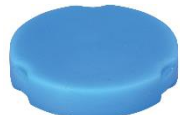

厚み	直径
16 mm	95 mm
18 mm	
20 mm	

DWX/4タイプ



サイズ
76×38×16 mm

2. 原材料

ポリエチレン、パラフィンワックス、着色材

3. 包装

ユニバーサル、A/G、Z/Z：1個/箱

DWX/4：3個/箱

【使用目的又は効果】

本品は歯科用CAD・CAM機専用用いるワックスで固定式補綴修復物のろう型作製用用いる。

【使用方法等】

1) 本品をミリングマシンにセットする。

2) ミリングマシンにて本品を削り出し、クラウン・ブリッジ等の鑄型用ろう型を製作する。（操作はミリングマシンのマニュアルに準ずる）

3) 製作したろう型を歯科用埋没材（クリストバライト系、りん酸塩系）で埋没し、リングファーンズで焼却処理を行う。

【使用上の注意】

- 1) 歯科技工の目的以外に使用しないこと。
- 2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 3) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 4) クリストバライト系の埋没材を使用する場合は、強度の高いものを使用すること。（またパターン同士の間隔は十分に取ること）

**【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Bilkim Tibbi Urunler San.ve Tic.

（ビルキム ティビ ウルンスラー社）

製造国：トルコ共和国