

インプラントアナログ LABO

*【禁忌・禁止】

1. 他メーカーの印象用コーピングと組み合わせをしないこと。形状が異なるため、適切な組み合わせが得られない。
2. 器具の形態変更や改造はしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

■Straumann 互換用



No.	タイプ	全長
①	ホーンレベル	N 12.5
②		R 12.2
③	ティッシュレベル	R 12.0
④		W 12.0

(単位: mm)

■Nobel 互換用



No.	タイプ	全長
⑤	エクスターナル	R 14.0
⑥		W 14.0
⑦		N 14.0
⑧	マルチユニット	R 15.0
⑨		W 14.0
⑩	アクティブ	R 10.0
⑪		N 10.0
⑫	リプレイス	N 10.9
⑬		R 10.9

(単位: mm)

■Astra 互換用



No.	タイプ	全長
⑭	スモール (アクア)	15.0
⑮	ラージ (ライラック)	15.5

(単位: mm)

■Xive 互換用



No.	タイプ	全長
⑯	シルバー	13.0
⑰	イエロー	13.0
⑱	ブルー	12.8

(単位: mm)

■POI 互換用



No.	タイプ	全長
⑲	EX3.7	9.0
⑳	EX4.2	9.0

(単位: mm)

■Camlog 互換用



No.	タイプ	全長
㉑	シルバー	12.0
㉒	イエロー	12.0
㉓	パープル	12.0
㉔	ブルー	12.0

(単位: mm)

■Zimmer 互換用



No.	タイプ	全長
㉕	Spline 4.0	9.45
㉖	Spline 5.0	9.45
㉗	TSV 3.5	13.7
㉘	TSV 4.5	13.7

(単位: mm)

■3i 互換用



No.	タイプ	全長
②⑨	エクスターナル 3.4	9.9
③⑩	エクスターナル 4.1	11.6
③①	エクスターナル 5.0	11.45
③②	インターナル 3.4	14.6
③③	インターナル 4.1	15.1
③④	インターナル 5.0	15.1

(単位: mm)

2. 原材料

- ①～⑬、②⑨～③①: ステンレススチール
- ⑭、⑮、⑲～⑲⑦、⑳②～⑳④: チタン合金
- ⑳⑥～⑳⑧: アルミ合金
- ⑳⑩: チタン合金

3. 包装

1 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

ピックアップ印象法

- 1) 埋入されたインプラント体に印象用コーピング (別売) をセットする。
- 2) メーカー指示のもと、印象用個人トレーを製作する。またはインプラント用印象用トレーを使用する。(※場合によっては印象に先立ち、残存歯のアンダーカット部分をユーティリティワックスや寒天印象材等を用いてブロックアウトしておく。)
- 3) 印象コーピングが確実に装着されていることを確認の後、メーカー指示のとおり印象採得を行う。
- 4) 印象材硬化後、メーカー指示のもと、トレーを口腔内より取り外す。その際、印象用コーピングがインプラントから外れ、印象材内に取り込まれているかを確認すること。
- 5) 印象材に取り込まれた印象用コーピングに本品を連結し、確実に固定する。
- 6) トレーに超硬石膏を注入し石膏模型を完成させる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 1) 使用者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。(著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがある。)
- 2) 過剰な外圧をかけないこと。
- 3) 使用者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻 (刻印) 等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 洗浄上の注意

[洗浄]

- ・ 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水 (超酸性水) 等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー (磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

[その他]

- ・ 洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する (錆びる) ことがある。
- ・ 洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。

・ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: UNIDENTAL Co., Ltd. (ユニデンタル社)
製造国: 大韓民国