

インプラントアナログ LABO

***【禁忌・禁止】**

他メーカーの印象用コーピングと組み合わせをしないこと。形状が異なるため、適切な組み合わせが得られないため。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

No.	タイプ	規格
①	Straumann BONE LEVEL	NC
		RC
②	Straumann TISSUE LEVEL	RN
		WN
③	Nobel Biocare External	RP
		WP
		NP
④	Nobel Biocare MULTI-UNIT	RP
		WP
⑤	Nobel Biocare Active	RP
⑥	Nobel Biocare Replace	NP
		RP
⑦	AstraTech Osseo Speed	Aqua3.5
		Lilac4.5
⑧	Xive	3.4 (シルバー)
		3.8 (イエロー)
		4.5 (ブルー)
⑨	POI	EX3.7
		EX4.2
⑩	Camlog	3.8 (イエロー)
		4.3 (ハーフブルー)
		5.0 (ブルー)
⑪	Zimmer Spline	4.0
		5.0
⑫	Zimmer TSV	NP
		RP
⑬	3i External	3.4
		4.1
		5.0
⑭	3i Internal	3.4
		4.1
		5.0
⑮	FINESIA Bone Level	RP
		WP
		NP
⑯	FINESIA Tissue Level	RP
		WP

2. 原材料

- ①～⑦、⑬：ステンレススチール
- ⑨～⑫、⑭～⑯：チタン合金
- ⑧：アルミ合金

3. 包装

1個 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

ピックアップ印象法

- 1) 埋入されたインプラント体に印象用コーピング(別売)をセットする。

- 2) メーカー指示のもと、印象用個人トレーを製作する。またはインプラント用印象用トレーを使用する。(※場合によっては印象に先立ち、残存歯のアンダーカット部分をユーティリティワックスや寒天印象材等を用いてブロックアウトしておく。)
 - 3) 印象コーピングが確実に装着されていることを確認の後、メーカー指示のとおり印象採得を行う。
 - 4) 印象材硬化後、メーカー指示のもと、トレーを口腔内より取り外す。その際、印象用コーピングがインプラントから外れ、印象材内に取り込まれているかを確認すること。
 - 5) 印象材に取り込まれた印象用コーピングに本品を連結し、確実に固定する。
 - 6) トレーに超硬石膏を注入し石膏模型を完成させる。
- 【使用方法等に関連する使用上の注意】
- ・使用者は、使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常が無い事を確認すること。(著しい傷や磨耗がある場合は破損する恐れがある。)
 - ・過剰な外圧をかけないこと。
 - ・使用者は、本製品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後使用すること。

***【使用上の注意】**

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒータリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。

***【保守・点検に係る事項】**

1. 洗浄

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー(磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。(必要に応じて潤滑油を塗布すること。)

2. その他

- ・洗浄にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する(錆びる)ことがある。
- ・洗浄後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

- 3. 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：DentalOK, Inc. (デンタルオーケー社)
製造国：大韓民国

製造業者：UNIDENTAL Co., Ltd. (ユニデンタル社)
製造国：大韓民国