

*2017 年 6 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）
2017 年 2 月作成（第 2 版）

届出番号：17B2X10001000570

医療用品（01）エックス線フィルム
一般医療機器 スクリーン型歯科画像診断用 X 線フィルム JMDN コード：40977000

C i パノラマフィルム

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



ブルー感度（レギュラー） グリーン感度（オルソ）

2. 原材料
X 線フィルム
3. 包装
50 枚 / 箱

【使用目的又は効果】

特に歯科 X 線装置で使用するためにサイズを定めて設計したスクリーン型 X 線フィルムをいう。スクリーン型フィルムは、主に増感紙から発せられた光線の波長に高い感受性を示すように設計されている。酢酸セルロース、ポリエステル樹脂、又は他の適切な材料から作られた透明なフィルムベースの片面（片面乳剤フィルム）又は両面（両面乳剤フィルム）に光線と X 線に感受性を有する粒子で構成される感光乳剤を塗ったシートである。

*【使用方法等】

フィルムを X 線カセットに装填し、X 線撮影を行った後、現像処理を行う。

【使用上の注意】

1. 適切な安全光の下で開封すること。
2. 開封後はなるべく早めに使用すること。又、遮光のため内袋に入れたまま保管のこと。
3. 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
4. フィルムが接着するような極度な高温下での使用は避けること。
5. 静電気が発生するような極度な低湿度下での取扱いは避けること。
6. 濡れた手による取扱いは避けること。
7. 二重露光は避けること。
8. 使用目的以外には使わないこと。特にスポットライトや OHP を使用する場合には、注意すること。
9. 長時間高温下での取扱いは避けること。
10. 有効期間（使用期限）内に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

フィルムは直射日光を避けて、放射線や X 線及び有害ガス（フォルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない低温・低湿の場所に保管してください。
推奨温度：10～24℃
推奨湿度：30～50%

【使用期限】

容器に記載されている使用期限（製造日より 3 年）までに使用すること。

（ 20YY - MM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800