

ジルコンフレックスJ

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

HP タイプ



SZ667 SZ722 SZ602 SZ623 SZ652R

型番	SZ667	SZ722	SZ602	SZ623	SZ652R
作業部径(φ)	3.5	18.0	4.0	6.0	3.5

[単位: mm]

2. 原材料

作業部: 炭化ケイ素(シリコンカーバイト)
シャンク: ステンレススチール

3. 包装

各1本 / ケース

【使用目的又は効果】

本品は炭化ケイ素、アルミナ等を用いる技工用研削材で、ジルコニアの研削に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 歯科用電気駆動装置にシャンクを確実に挿入する。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

製品コード	推奨回転数	最大回転数
SZ667、SZ602 SZ623、SZ652R	10,000~15,000	20,000
SZ722	7,000	7,000

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- ・使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりするので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒータリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- 3) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: JOTA AG (ジョタ エージー社)
製造国: スイス