

アトリアミラートップ

**【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。
- ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

[ステンレススチール製ヘッド]



プレーンタイプ	#3、#4
フロントサーフェイスタイプ	#3、#4、#5



ダブルサイドタイプ
DS4SS

[プラスチック製ヘッド]



プレーンタイプ	P4SS
フロントサーフェイスタイプ	PF4SS

[ミラー寸法]

#3	φ 20.5mm
#4	φ 22.5mm
#5	φ 24.5mm
DS4SS	φ 23mm
P4SS、PF4SS	φ 23.4mm

2. 原材料

[ステンレススチール製ヘッド]

ガラス（シルバー又はクロムコーティング）、ステンレススチール

[プラスチック製ヘッド]

ガラス（シルバー又はクロムコーティング）、ステンレススチール、PPSU

3. 包装

12 個 / 箱（#3、#4、#5、P4SS、PF4SS）

5 個 / 箱（DS4SS）

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

**【使用方法等】

[使用方法]

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。滅菌温度は下記のとおり）

[滅菌条件]

タイプ	オートクレーブ温度
#3、#4、#5、DS4SS	134℃以下
P4SS、PF4SS	121℃以下

- 口腔内にて反射鏡として使用する。

**【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 洗浄・滅菌について

[洗浄]

- 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

[滅菌]

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。（オートクレーブ温度は【使用方法】に記載した[滅菌条件]に従って行うこと。）
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

[その他]

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- 塩素系消毒剤は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Atria Co.（アトリア社）

製造国：大韓民国