

**2018 年 5 月改訂（第 3 版）

*2017 年 11 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000617

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN コード：70903000

ダイヤモンドポリッシャー ac（HP）

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り
HP 用

形状			
型番	コース	803 104 303 527 220	803 104 372 527 110
	ファイン	803 104 303 517 220	803 104 372 517 110
作業部 最大径（Φ）		22.0mm	11.0mm
作業部長		1.0mm	2.0mm
形状			
型番	コース	803 104 243 527 045	
	ファイン	803 104 243 517 045	
作業部 最大径（Φ）		4.5mm	
作業部長		13.0mm	

【カラー】

ブラウン：コース

ブラウングリーン：ファイン

2. 包装

1 本 / ケース

【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材である。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 歯科用電気駆動装置にシャンクを確実に挿入して下さい。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外でセラミック等を研磨する。
※回転数は明記してある速度を厳守すること。
※最大回転数：10,000rpm

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。

*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Acurata GmbH & Co. KG

（アキュラタ ゲーエムペーハー社）

製造国：ドイツ