

機械器具 (35) 医療用はさみ

一般医療機器 はさみ JMDNコード : 35325001

MDSY メーヨ剪刀

*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記のとおり

形状		
製品番号	3515	3535
	直	直
全長	140mm	200mm
形状		
製品番号	3516	3536
	曲	曲
全長	140mm	200mm

2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

1本 / 包

【使用目的又は効果】

手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる

*【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済かどうか確認すること
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。)
- 2) 先端窪みを利用し、糸等を切断する。

*【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻 (刻印) 等の二次加工やヒータリングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食 (錆び) することがある。
- 4) 洗浄・滅菌上の注意

【洗浄】

・使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水 (超酸性水) 等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー (磨き粉)、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【滅菌】

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する (錆びる) ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル

住所 : 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : Medesy s. r. l. (メデシー社)

製造国 : イタリア