

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード：35768000

再使用禁止

プロフィーブラシ

*【禁忌・禁止】
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

装着部：CA 用、スクリュー用

作業部形状	タイプ	毛タイプ
カップ	ソフト	ピンクナイロン
	ミディアム	パープルナイロン
		ホワイトナイロン
フラット	ミディアム	ホワイトナイロン
	ミディアムハード	ホワイトブリストル
	ハード	ブラックブリストル
ポイント	ミディアム	ホワイトナイロン
	ミディアムハード	ホワイトブリストル
	ハード	ブラックブリストル
スマート	ソフト	ピンクナイロン
	ミディアム	パープルナイロン

2. 包装
各 100 本 / 包
ピンク、パープルカラー：10 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

*【使用方法等】

- 〔使用方法〕
1. 研磨部位に応じて本品を選択する。
 2. 選択した本品を歯科用電気駆動装置等に取り付ける。
 3. 本品に研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。
 4. 本品を歯全体に軽く押しつけて研磨する。
- ※最大回転数：10,000rpm

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。
- ・折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・使用に関しては、プロフィーブラシを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。
- ・目の損傷を防ぐために、保護眼鏡などを使用すること。

**【使用上の注意】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具に対して、形状変更等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 本品に適合しない歯科用電気駆動装置での使用はしないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Stoddard Manufacturing Company Limited
（ストッダード マニュファクチャリング カンパニー社）
製造国：イギリス