

再使用禁止

NEWミキシングチップ

*【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

形状	カラー	タイプ	全長(mm)
	イエロー	細	70
	ピンク	中	85
	グリーン	太	87
	ブルー	細細	58
	パープル	コアミックス チップロング	48
	-	コアミックス チップショート	37
	-	レジンセメント チップショート	40
	-	レジンセメント チップロング	50
	イエロー	細 セーブタイプ	58
	グリーン	太 セーブタイプ	80

2. 原材料

外側：エチレンプロピレンゴム

内側スクリュー：ポリアセタール樹脂（コアミックスチップロング、コアミックスチップ）、エチレンプロピレンゴム（その他）、着色材

3. 包装

50 個 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

**【使用方法等】

【使用方法】

- 1) ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
- 2) カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、2 種のペーストが均等に吐出されることを、試し出しをして確認する。
- 3) カートリッジ先端に本品を装着する。（カートリッジとミキシングチップの装着は、使用するカートリッジのミキシングチップ装着方法に準じる。）
- 4) ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・使用前に本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・ペーストを吐出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・本品内部でペーストが硬化した後に無理に操作しないこと。

*【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 2) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは、使用しないこと。
- 3) 本品を分解、改造などし、歯科練成器以外の用途には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：SeilGlobal Co., Ltd.（セイルグローバル社）

製造国：大韓民国