

レーズブラシ (Stoddard)

*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

形状			
サイズ 軸部×直径	40×80	40×80	25×57
植毛タイプ			
	4 列・カーブ	3 列・カーブ	3 列・カーブ

形状			
サイズ 軸部×直径	30×63	25×50	30×63
植毛タイプ			
	3 列・カーブ	2 列・カーブ	2 列・カーブ

(単位:mm)

2. 原材料

軸部: プラスチック
ブラシ部: 豚の毛

3. 包装

10 個 / 包

【使用目的又は効果】

歯科技工用レーズに装着し、補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 本品を歯科技工用レーズに装着する。
- 2) 本品が確実に固定されている事を確認し、試運転する。
- 3) 補綴物を研磨する。

※使用回転数: 2,800rpm 以下厳守

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 指定の回転数を超過して使用しないこと。
- 2) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 3) 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 歯科技工用レーズの取扱説明書に従い、ホルダーを確実に装着したことを確認してから使用すること。
- 5) ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 6) 安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- 7) 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- 8) 回転不良・装着時のふれや装着がゆるい場合は、使用をしないこと。
- 9) 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるため十分に注意すること。
- 10) 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨剤の種類別に分けて使用すること。

*【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 植毛部（ブラシ部）から絶対に毛を抜いたり、加工したりしないこと。
- 3) ブラシ用洗浄液等に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあるので十分注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: Stoddard Manufacturing Company Limited

(ストッダード マニュファクチャリング カンパニー社)

製造国: イギリス