

**2018 年 8 月改訂（第 4 版）

*2018 年 5 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000732

機械器具（66）歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000

再使用禁止

SP ミキシングチップ

**【禁忌・禁止】

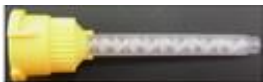
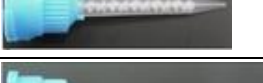
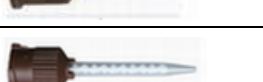
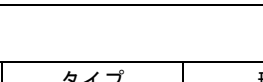
1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り

【ミキシングチップ】

型番	タイプ	形状	全長
95013	イエロー		70mm
95026	ピンク		83mm
95027	グリーン		88mm
96008	ライトブルー		58mm
96009	ライトブルー 先細 タイプ		64mm
96010			77mm 10:1
96007	ブラウン		36mm
96005	ブラウン 先細 タイプ		40mm
96006			50mm

【オーラルチップ】

	型番	タイプ	形状
①	95014A	イエロー A-S	
②	95014B	イエロー B-S	
③	95028	ホワイト L	
④	95029	ホワイト W	
⑤	96004	ホワイト XS	
⑥	99001	ホワイト XXS	

※オーラルチップ①、②はミキシングチップイエロー、
ライトブルー58mm 用。

※オーラルチップ③、④はミキシングチップピンク、グリーン用。

※オーラルチップ⑤、⑥はミキシングチップブラウン 36mm 用。

2. 原材料

ミキシングチップ：ポリプロピレン、ポリアセタール

オーラルチップ：ポリプロピレン

3. 包装

ミキシングチップ 各 50 個 / 袋

オーラルチップ 各 100 個 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は歯科材料（印象材料、セメントなど）を練和又は混和するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) ディスペンサーガン（別売）にカートリッジ（別売）を取り付ける。
- 2) カートリッジのキャップ（又は使用済みミキシングチップ）を取り外し、2 種のペーストが均等に練和・吐出されることを試し出しをして確認する。
- 3) カートリッジ先端にミキシングチップを装着する。必要に応じて各オーラルチップをミキシングチップの先に装着する。（カートリッジとミキシングチップの装着は各ミキシングチップの装着方法に準じ装着する。またミキシングチップの先端にオーラルチップを装着する際は、カチッと音がするまで押し込む。）
- 4) ディスペンサーのレバーを握りペーストを押し出すと、練和物が本品先端より吐出される。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ペーストを吐出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- ・ミキシングチップ内でペーストが硬化した後無理に操作しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しないカートリッジには使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800