

**2018 年 9 月改訂（第 4 版）

*2017 年 5 月改訂（第 3 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000739

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN コード：70903000

ビッグポイント

*【禁忌・禁止】

1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



作業部長：24mm
作業部径：φ10mm

カラー	タイプ
ブラウン	エクストラコース
グレー	コース
グリーン	ミディアムコース
アイボリー	ファイン

2. 原材料

軸部：ステンレスチール
作業部：シリコンカーバイト粒、炭化ケイ素

3. 包装

12 本 / ケース

【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材である。レジンやベースプレート、アクリル研削等を使用する。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 用途に応じて本品を選択する。
- 2) 歯科用電気駆動装置にシャンクを確実に挿入する。
- 3) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

タイプ	推奨回転数	最大回転数
エクストラコース	8,000～10,000	15,000
コース		
ミディアムコース		
ファイン	6,000～8,000	12,000

（単位：rpm）

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・指定の最大回転数を超過して使用しないこと。
- ・損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ・使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・歯科用電気駆動装置の取扱説明書に従い、バーを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。

- ・ヘッド形状によっては、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・安全の為に、保護眼鏡を使用すること。
- ・作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

*【使用上の注意】

- 1) 本品に適合しない歯科用電気駆動装置には使用しないこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレスチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食する（錆びる）ことがある。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800