

再使用禁止

プロフィーカップブラシ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品を本来の使用目的以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 直射日光を避け、室温で保管すること。
- 2) 使用後は地方自治体の法則に則り適切な処分を行うこと。
- 3) 歯科従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 包装
100 本 / 袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

【使用目的又は効果】

本品は歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

【使用方法】

- 1) 研磨部位に応じて本品を選択する。
 - 2) 選択した本品を歯科用電気駆動装置に取り付ける。
 - 3) 本品に研磨ペーストをブラシに適量塗布し、歯面研磨を行う。
- ※最大回転数：20,000rpm

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・あらかじめ、患者の口腔外で回転させ、回転不良やぶれがないことを確認してから使用すること。
- ・無理な力を加えないこと。（破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある）
- ・使用に関しては、プロフィーブラシを歯にあてた後、回転させること。口腔外で回転させると研磨ペーストが飛び散ることがあるので注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 歯科従事者以外は使用しないこと。
- 2) 本品は単回使用とし、再使用を禁止する。
- 3) 本品に適合しないハンドピースには使用しないこと。
- 4) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは使用しないこと。
- 5) 本品を本来の使用目的以外には使用しないこと。