

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000

プレミアHRデンタルミラー

*【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り



サイズ	直径(mm)
Size 2	18
Size 3	20
Size 4	22
Size 5	24
Size 6	26

- 原材料
ステンレススチール、ミラーガラス
- 包装
12個 / 箱 (Size 2~6)
50個 / 箱 (Size 2, 3, 4)

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診査のために用いる。

*【使用方法等】

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む134℃以下厳守。)
- 口腔内にて反射鏡として使用する。

*【使用上の注意】

- 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し滅菌を行うこと。
- 過度の圧力をかけたり、落としたりすると破折する事があるので注意すること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

5. 洗浄・滅菌上の注意

〔洗浄〕

- 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
※ミラー面が傷つく恐れがあるので、クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは使用しないこと。曇った場合は柔らかい布などで拭くこと。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

*【保管方法及び有効期間等】

- 破損及び破折の恐れがあるので、周囲に重量のある器具などと一緒に保管しないこと。
- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は、破損、ヒビ、大きな腐食などがなければ確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Prima Dental Group（プリマデンタル社）
製造国：イギリス