

*2017 年 11 月改訂（第 3 版）

2016 年 3 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）

届出番号：17B2X10001000774

歯科材料（09）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN コード：70903000

シリコンラバーポリシャー

*【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



タイプ	カラー
エクストラコース	ブラック
コース	ブラウン
ミディアムコース	グリーン
ファイン	グレー

2. 原材料
合成ゴム
3. 包装
100 個 / 包

【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材である。

*【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 本品をディスク用マンドレル（別売）に装着し、歯科用電気駆動装置にマンドレルを奥まで確実に挿入する。
- 2) 試運転して回転に振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

※推奨回転数

- ・ エクストラコース、コース、ミディアムコース
20,000～30,000rpm（最大 30,000rpm）
- ・ ファイン
10,000～20,000rpm（最大 20,000rpm）

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 指定の最大回転数を超えて使用しないこと。
- ・ 使用前に試運転を行い、振れがないことを確認すること。
- ・ 歯科用電気駆動装置等の取扱説明書に従い、マンドレルを確実に奥まで装着したことを確認してから使用すること。

- ・ 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・ 研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。
- ・ 作業中に異常音が発生したり、激しく振動するような場合、破損が疑われる場合は直ちに作業を停止すること。
- ・ 本品は高速回転で使用されるため、使用中に破折する可能性があるので十分に注意すること。

*【使用上の注意】

- 1) 保護眼鏡を必ず着用すること。
- 2) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、曲がり）等があるものは使用しないこと。
- 3) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800