

オーマプラスラブ

【禁忌・禁止】

本材または本材に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記のとおり



M4000・M4005



M4300・M4310

2. 仕様

ショア硬度（A）	90（±3）	70（±3）
混和比	1：1	1：1
練和時間	30 秒	30 秒
作業時間	1 分 40 秒	1 分 40 秒
硬化時間	4 分 30 秒	4 分 30 秒

（室温：23℃）

3. 包装

ショア硬度 90

M4000：ベース 900 g+キャタリスト 900 g

M4005：ベース 2.5 Kg+キャタリスト 2.5 Kg

ショア硬度 70

M4300：ベース 750 g+キャタリスト 750 g

M4310：ベース 5 Kg+キャタリスト 5 Kg

4. 原材料

・ベース（M4000、M4005、M4300、M4310）
二酸化ケイ素、石英、ビニル末端ポリジメチルシロキサン、
L-カルボン、着色材

・キャタリスト（M4000、M4005、M4300、M4310）
二酸化ケイ素、石英、ビニル末端ポリジメチルシロキサン、
白金（0）-1,3-ジビニル-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン
錯体 溶液

【使用目的又は効果】

歯科用複模型の作成に用いるシリコン印象材。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) ベースとキャタリストを 1：1 の割合で取る。
- 2) 2 材を混合し、ひも状に引き伸ばして、折り束ねる操作を繰り返す、均一になるまで指先で十分にこねる。少なくとも 30 秒間この練和作業を行う。
- 3) 模型に練和物を盛る。
- 4) 硬化時間は練和開始から 4 分 30 秒間である。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 硬化阻害を起こすことがあるので、ゴム製品への接触をしないこと。またゴム手袋を使用したまま、または使用した手で練和しないこと。ゴム手袋を使用した場合は、手を十分洗浄したのち本材を使用すること。
- 2) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
- 3) 本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ・使用後は直ちに容器を閉め、蓋、計量スプーンを他のものと混同しないこと。
- ・硬化したシリコンは化学的に安定しており、衣服に付着すると除去できないので注意すること。
- ・本材と他社製シリコンとを混合して使用しないこと。
- ・作業は 18～25℃の室内で行うこと。

2) 重要な基本的注意事項

- ・本材に対して過敏症のあるものは、直接触れないようにすること。万一接触して過敏症状が現れた場合、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光、高温多湿を避け、火気厳禁の場所に保管すること。

【使用期限】

容器に記載されている使用期限（製造日から 3 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

（※例  MM/YY は使用期限 YY 年 MM 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Major Prodotti Dentari S.p.A.

（メジャー プロドッティ デンタリー社）

製造国：イタリア