

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDN コード：35531000

再使用禁止

サージカルドレープⅡ

*【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

*【形状・構造及び原理等】

[形状・構造等]
不織布製のドレープ

形状例：



[包装]
1 枚 / パック

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために用いる。患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。単回使用である。

【使用方法等】

1. 滅菌包装に破れ等の損傷がないことを確認する。
2. 無菌操作で包装から取り出す。
3. 使用目的の部位・場所に掛けて使用する。

【使用上の注意】

- 1) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 2) 本品は単回製品であり、再使用・再滅菌はしないこと。
- 3) 滅菌包装は使用直前に開封すること。また開封後は直ちに使用すること。
- 4) 高温を発する機器類に接しないように注意すること。
- 5) 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
直射日光、水濡れ、高温、多湿の環境を避け、室温で保管すること。

[使用期限]
包装に記載の使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）