

機械器具（36）医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDNコード：31814000

SCマイクロフォーセップス

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

[形状・構造等]
無鉤タイプ



有鉤タイプ



[包装]

1本/包

[原材料]

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、2つの先細のバネ性先端部をもつ歯科手用器具で、先端部を近接させて（閉じて）、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するために用いる。

【使用方法】

- (1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程も含み 134℃以下厳守。）
- (2) 先端で組織等を把持する。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。
- (2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- (3) 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- (4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
 - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、錆潤滑油を塗布することを推奨する。
 - ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度（乾燥工程も含む）134℃以下厳守】。
 - ・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

【保管方法及び有効期間】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：A. Schweickhardt GmbH&Co. KG
（アーシュバイクハルト社）
製造国：ドイツ