

再使用禁止

Wプラミラー

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

下記外観写真の通り



全長	167 mm
ミラー部	φ 21.5 mm

2. 原材料

柄：プラスチック

鏡：ポリカーボネート

3. 包装

1 本 / 包

100 本 / 箱

【使用目的又は効果】

口腔内の状態を検査・観察するために使用する。

【使用方法等】

袋から取り出し、口腔内にて反射鏡として使用する。

【使用上の注意】

- (1) 本来の目的以外には使用しないこと。
- (2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- (3) ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用前に、磨き粉、金属ウール、金属ブラシなどで表面を磨かないこと。曇った場合はやわらかい布などで拭くこと。
- (4) 消毒が必要な場合は、薬液を使用すること。(オートクレーブ滅菌不可。)
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。
- (6) 溶解や破折の原因となるので、器具をヒートリングしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (2) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズがないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800