

医療用品（04）整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDNコード：70975000

再使用禁止

リッチモンドコットンロール

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



タイプ	サイズ
ラップ	φ10×38mm
編込済	φ10×38mm
編込済ピド	φ8×19mm

2. 原材料

綿、ナイロン／アセテート（外周の糸）

3. 包装

ラップ 2000本／箱  
編込済 2000本／箱  
編込済ピド 1400本／箱

【使用目的又は効果】

本品は医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

本品を取り出し、適宜滅菌し使用すること。  
（滅菌温度 121℃以下）

\*【使用上の注意】

1. 医療従事者以外は使用しないこと。
2. 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、使用しないこと。
3. 開封後は速やかに使用すること。

4. 高温蒸気滅菌すること。（滅菌温度 121℃以下）
5. 使用後は感染予防に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：RICHMOND DENTAL（リッチモンドデンタル社）  
製造国：アメリカ合衆国