

再使用禁止

リッチモンドコットンロール

**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。

**\*【形状、構造及び原理等】**

1. 形状・構造  
タイプ：ラップ、編込済、編込済ピド
2. 原材料  
綿、ナイロン／アセテート（外周の糸）
3. 包装  
ラップ、編込済：2000本 / 箱  
編込済ピド：1400本 / 箱

**【使用目的又は効果】**

本品は医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

**【使用方法等】**

本品を取り出し、適宜滅菌し使用すること。  
（滅菌温度 121℃以下）

**\*【使用上の注意】**

1. 劣化や異常がみられた場合、使用を中止すること。
2. 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、使用しないこと。
3. 開封後は速やかに使用すること。
4. 高温蒸気滅菌すること。（滅菌温度 121℃以下）
5. 使用後は感染予防に留意し、衛生的に処理すること。

**\*【保管方法及び有効期間等】**

高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：RICHMOND DENTAL（リッチモンドデンタル社）  
製造国：アメリカ合衆国