

\*\*2020 年 12 月改訂(第 4 版)

届出番号 : 17B2X10001000842

\* 2017 年 2 月改訂(第 3 版)

医療用品 (04) 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード : 34655000

再使用禁止

## 不織布スポンジ

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 体内に留置しないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、使用しないこと。

### \*\*【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

| タイプ     | 層   | サイズ         |
|---------|-----|-------------|
| コットン    | 4 層 | 51 mm×51 mm |
| ポリ/レーヨン |     |             |

#### 2. 原材料

綿 又は ポリエステル 、レーヨン

#### 3. 包装

200 枚 / 包

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制等の為、創傷又は外科切開部を処置する為に用いる  
不織布からなる被覆・保護材。

### 【使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

### 【使用上の注意】

1. 本品を包装から出して高圧蒸気滅菌して使用し、処置後に繊維が患部に残らないように注意すること。
2. 包装及び本品に破損、汚損等が見られる場合は、使用しないこと。
3. 開封後は速やかに使用すること。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル

住所 : 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : RICHMOND DENTAL (リッチモンドデンタル社)

製造国 : アメリカ合衆国

製造業者 : SION BIOTEXT MEDICAL LTD. (サイオンバイオテックスメディカル社)

製造国 : イスラエル