

医療用品(04)整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ JMDNコード: 13700000

再使用禁止

オールガーゼスポンジ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は使用を中止すること。

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造
12層タイプ: 51×51 mm
8層タイプ: 51×51 mm

2. 原材料
綿

3. 包装
200枚 / 包

【使用目的又は効果】

外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官を保護する。

【使用方法等】

本品を袋より取り出し、適宜滅菌し使用すること。
(滅菌温度 121℃以下)

【使用上の注意】

1. 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、使用しないこと。
2. 開封後は速やかに使用すること。
3. 高温蒸気滅菌すること。(滅菌温度 121℃以下)
4. 使用後は感染予防に留意し、衛生的に処理すること。

**【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: RICHMOND DENTAL (リッチモンドデンタル社)
製造国: アメリカ合衆国
製造業者: 湖北福好医療用品有限公司
(コホクフッコウイリョウヨウヒンユウゲンコウシ)
製造国: 中華人民共和国