

再使用禁止

コットンペレット

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



5



4



3



2

サイズ	#2	#3	#4	#5
直径	約 5.5mm	約 4.0mm	約 3.0mm	約 2.4mm

2. 原材料

綿

【使用目的又は効果】

本品は様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊から成る器具をいう。

【使用方法等】

本品を箱より取り出し、適宜滅菌し使用すること。
(滅菌温度 121℃以下)

* 【使用上の注意】

1. 医療従事者以外は使用しないこと。
2. 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、使用しないこと。
3. 開封後は速やかに使用すること。
4. 高温蒸気滅菌すること。(滅菌温度 121℃以下)
5. 使用後は感染予防に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：RICHMOND DENTAL (リッチモンドデンタル社)
製造国：アメリカ合衆国