

プローブ AA

【禁忌・禁止】

1. 本品を改造しないこと

【形状・構造及び原理等】



CP-11



CP-12



CP-15



WHO

型名	深度スケール (mm)
CP11	3-6-8-11
CP12	3-6-9-12
CP15	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
WHO	3.5-5.5-8.5-11.5

【包装】

1 本 / 包

【原材料】

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる。

【使用方法】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守）
- 2) 使用する適切な器具の種類を選択する。
- 3) 本品の先端部を歯周ポケット部に挿入し、歯肉辺縁あるいはセメント-エナメル境界からポケット底までの深度をプローブ先端部の目盛りによって読み取る。ポケット深度は、1本の歯でも一定でないため、通常、1本の歯の周囲 4～6 点を測定し、記録する。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。

- 2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 3) 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- 4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
 - ・ 使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。洗浄の際は、先端マーキング部をブラシ、スポンジ等でこすり洗いをしないこと。マーキングが薄くなる場合がある。
 - ・ 固着した血液がある場合の予備洗浄には、当社、血液分解フォームなどのたんぱく分解剤を使用することを推奨する。
 - ・ 洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
 - ・ 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
 - ・ 洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度（乾燥工程も含む）134℃以下厳守】。
 - ・ 水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam's Aid Corporation（アダムスエイド社）
製造国：パキスタン