

**2017 年 11 月改訂（第 3 版）

*2017 年 10 月改訂（第 2 版）

届出番号： 17B2X10001000902

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード：34864000

再使用禁止

メッシュフィックスド Dressing パッド

*【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 体内に留置しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



サイズ	
粘着部	パッド部
40×60mm	20×35mm
50×75mm	22×40mm
60×100mm	30×65mm

2. 原材料

基材：不織布
粘着剤：ゴム系接着剤（合成ゴム、他）
吸収材：不織布、ポリエチレンフィルム
剥離紙：シリコン油、紙

3. 包装

- ・ 40×60mm 100 枚/箱
- ・ 50×75mm 50 枚/箱
- ・ 60×100mm 50 枚/箱

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- 1) 剥離紙を剥がし、貼付面に触れないように患部に貼付する。
- 2) テープの周りに浮きやシワができないように皮膚に密着させる。

*【使用上の注意】

1. 包装に開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
2. 貼付する前に患部やその周囲の皮膚を洗浄・消毒し十分に乾燥させてから貼付すること

3. 開封後は、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。
4. 皮膚に異常が現れた場合は、使用を中止して医師、薬剤師に相談すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。

〔使用期限〕

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）
（20YY. MM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：WAYSON Medical Co., Ltd
（ウェイソン メディカル社）
製造国：中華人民共和国