

フォーマ デンタルフィルム

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



タイプ	サイズ (mm)
D 感度 (大人用)	約 30×約 40
F 感度 (大人用)	約 30×約 40

2. 原材料
塩化ビニル樹脂、鉛箔、ポリエチレンフタレート、その他
3. 包装
150 枚 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は、特に歯科 X 線装置で使用するためにサイズを定めて設計したノンスクリーン型 X 線フィルムで、X 線に直接露出させるように設計されている。

**【使用方法】

X 線レントゲン装置に当デンタルフィルムをセットし、撮影を実施する。撮影時間は下表のとおり。撮影に当たっては、レントゲン装置の取扱説明書等に従い正しく行うこと。

撮影部位	部位	撮影時間 (秒)	
		D 感度	F 感度
上顎	前歯	0.25	0.13
	小臼歯	0.30	0.17
	臼歯	0.35	0.19
下顎	前歯	0.20	0.10
	小臼歯	0.20	0.11
	臼歯	0.25	0.13

撮影時の管電圧 65kV、管電流 8mA

*【保管方法及び有効期間等】

- 【保管方法】
1. 直射日光を避け、温度 10～21℃、湿度 40～60%の場所で保管すること。
 2. 放射線や X 線及び有害ガス（ホルマリンガス、硫化水素ガス等）の影響を受けない場所で保管すること。

- 【使用期限】
- ・本品に記載された使用期限以内に使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

例：  20YY.MM は使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部の傷、大きな腐食がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：SKYDENT a.s.（スカイデント社）
製造国：スロバキア

**【使用上の注意】

1. フィルムはサイズにあった歯科用 X 線フィルムカセット（専用カセット）にて使用すること。
2. 適切な安全光の下で開封すること。
3. 開封後はなるべく早めに使用すること。また、遮光のため、内袋に入れたまま保管すること。
4. 局部的に折り曲げたり、擦ったり、強い圧力をかけたりしないこと。
5. フィルムが接着するような極度な高湿度下での使用は避けること。
6. 静電気が発生するような極度な低湿度下での使用は避けること。
7. 濡れた手による取り扱いを避けること。
8. 二重露光は避ける事。
9. 長時間高温度下での取扱いは避けること。
10. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
11. フィルムを廃棄する場合は、産業廃棄物となるので、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。