

プロフィラキス ペースト

*【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
性状：ペースト状
フレーバー：ペパーミント
粒子 (RDA)：50-99
2. 原材料
軽石、炭酸カルシウム、グリセリン、純水、他
3. 包装
200g / 個

製造業者：Prima Dental Group（プリマデンタル社）
製造国：イギリス

【使用目的又は効果】

歯面の研磨、清掃をするために用いる。

*【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) ブラシ又はカップ（別売）を歯科用電気駆動装置に装着する。
- 2) 本品をブラシまたはカップに適量採り（またはペーパーパッドに取り出してから採得し）、歯面研磨を行う。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがあるので、低速回転で使用する。
- 2) ペーストは乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。

*【使用上の注意】

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本品を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
- 3) 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

（ 20YY MM は、使用期限 20YY 年 MM 月を示す。）