

再使用禁止

D I Mアナログ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 他社製品と併用しないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造



タイプ	メーカー型番
CAMLOG 3.3	CAM 5. DIM. 330
CAMLOG 3.8	CAM 5. DIM. 380
CAMLOG 4.3	CAM 5. DIM. 430
CAMLOG 5.0/6.0	CAM 5. DIM. 506
CONELOG 3.3	COL 5. DIM. 330
CONELOG 3.8/4.3	COL 5. DIM. 384
CONELOG 5.0	COL 5. DIM. 500
REPLACE SELECT 3.5 NP	E 5. DIM. 350
REPLACE SELECT 4.3 RP	E 5. DIM. 430
REPLACE SELECT 5.0 WP	E 5. DIM. 500
REPLACE SELECT 6.0	E 5. DIM. 600
NOBEL ACTIVE 3.5 NP	F 5. DIM. 350
NOBEL ACTIVE 4.3/5.0 RP	F 5. DIM. 435
BRANEMARK 3.5	K 5. DIM. 350
BRANEMARK 4.1	K 5. DIM. 410
BRANEMARK 5.1	K 5. DIM. 510
CERTAIN 3.4	H 5. DIM. 340
CERTAIN 4.1	H 5. DIM. 410
CERTAIN 5.0	H 5. DIM. 500
OSSEOTITE 3.4	I 5. DIM. 340
OSSEOTITE 4.1	I 5. DIM. 410
OSSEOTITE 5.0	I 5. DIM. 500
BONE LEVEL 3.3 NC	L 5. DIM. 330
BONE LEVEL 4.1/4.8 RC	L 5. DIM. 414
STRAUMANN TL 3.5 NN	N 5. DIM. 350
STRAUMANN TL 4.8 RN	N 5. DIM. 480
STRAUMANN TL 6.5 WN	N 5. DIM. 650
TAPERED SCREW-VENT INTL7 3.5	R 5. DIM. 350
TAPERED SCREW-VENT INTL7 4.5	R 5. DIM. 450
TAPERED SCREW-VENT INTL7 5.7	R 5. DIM. 570
OSSEOSPEED 3.5/4.0	S 5. DIM. 354
OSSEOSPEED 4.5/5.0	S 5. DIM. 455
FRIALIT/XIVE 3.4	T 5. DIM. 340
FRIALIT/XIVE 3.8	T 5. DIM. 380
FRIALIT/XIVE 4.5	T 5. DIM. 450
FRIALIT/XIVE 5.5	T 5. DIM. 550
OSSTEM TS 3.5	HIO 5. DIM. 350
OSSTEM TS 4.0-6.0	HIO 5. DIM. 406
Astra Tech EV 3.0	SEV 5. DIM. 300
Astra Tech EV 3.6	SEV 5. DIM. 360
Astra Tech EV 4.2	SEV 5. DIM. 420
Astra Tech EV 4.8	SEV 5. DIM. 480
Astra Tech EV 5.4	SEV 5. DIM. 540
NEOSS 3.5-5.5	NEO 5. DIM. 355

2. 原材料

スクリュー部: チタン合金
ナット部: ステンレススチール

3. 包装

各 1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本材は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 口腔内に使用されたインプラントに適合するデジタル印象
ジグ(スキャンボディ 3Dガイド NT(別売)等)を用いて印
象採得したデジタルデータを使用する。
- 2) 本材のデジタルデータがインストールされた歯科用 CAD
ソフトを用いて口腔内のデジタルデータからのインプラ
ント作業模型データを作成する。
- 3) 製作したインプラント作業模型データを用いて 3D プリン
ターもしくは切削加工機で模型を作成する。
- 4) 症例に使用した歯科用インプラントフィクスチャに適合す
る本材を製作した作業模型に装着し、インプラント作業模
型を完成させる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本材を各種インプラント製品に装着した際、適切な嵌合が
得られているか確認し、異常がある場合は使用しないこと。
- 2) 模型に装着する際は、本材の向きや位置に注意し、正しい
嵌合が得られるようにすること。
- 3) 使用法は、各種純正品の使用法に準ずること。
- 4) 本品に過度の力、衝撃を与えないこと。

【使用上の注意】

- ・ 本材を口腔内には使用しないこと。
- ・ 使用前に必ず変形、破損等がないか確認し、異常が認めら
れる場合には使用しないこと。
- ・ 使用前に汚れや異物付着がある場合は、清潔な布等で拭き
とり使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・ 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管
すること。
- ・ 保管中、損傷しないように注意すること。

【使用期限】

包装に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期
限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号: 076-278-8800
製造業者: nt-trading GmbH & Co. KG
(エヌ ティー トレーディング社)
製造国: ドイツ