


Ci 喉頭鏡

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

1) ブレード

スタンダードタイプ

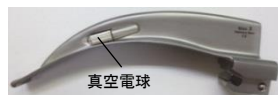

真空電球


マッキントッシュブレード
＜交換用付属品（別売）＞
・真空電球

FO タイプ



FO マッキントッシュブレード

サイズ	全長
No. 1	92 mm
No. 2	105 mm
No. 3	135 mm
No. 4	155 mm
No. 5	175 mm

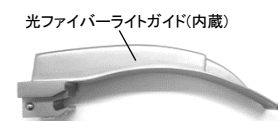

FO マッキントッシュブレード ML
左利き用

サイズ	全長
No. 0	80 mm
No. 1	93 mm
No. 2	114 mm
No. 3	135 mm
No. 4	155 mm
No. 5	175 mm

サイズ	全長
No. 1	95 mm
No. 2	105 mm
No. 3	135 mm
No. 4	155 mm
No. 5	175 mm



FO マッキントッシュブレード ML

サイズ	全長
No. 1	93 mm
No. 2	114 mm
No. 3	135 mm
No. 4	155 mm
No. 5	175 mm

＜交換用付属品（別売）＞

- ・FO タイプハンドル用キセノン電球ライトカートリッジ
- ・FO タイプハンドル用 LED 電球ライトカートリッジ

2. 原材料

ブレード：ステンレススチール
ハンドル：真鍮、クロムメッキ

3. 包装

1 個 / 箱

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具である。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。ハンドル、ブレードから成り、照明装置を内蔵する。

【使用方法等】

本品は未滅菌品のため、初回使用前には【保守・点検に係る事項】を参照し、ブレード、ハンドルとも滅菌を行うこと。（オートクレーブ推奨：乾燥工程を含む 134℃以下厳守）

- 1) 使用前に本品が滅菌済みかどうか確認する。
- 2) 適切なサイズのブレードとハンドルを選択する。
- 3) ハンドルサイズに適した大きさの乾電池を用意する。
- 4) ハンドルの先端部またはキャップを回して取り外し、メインハンドル内に＋極を上向きに電池を入れる。先端部またはキャップを取り付ける。
- 5) ハンドルにブレードを装着し、照明光が出ることを確認する。
- 6) 使用後はハンドルからブレードを外す。
- 7) 冷えていることを確認してから、電池及び下記画像に示す照明部品を取り外す。

ブレード

- ①スタンダードタイプブレードの電球を取り外す。




※電球の口金部分を持って反時計回り方向に回してください。

口金

※FO タイプの光ファイバーライトガイドは取り外し不可。

ハンドル

- ①スタンダードタイプ、FO タイプとも、先端部を回してメインハンドルから取り外し、電池を取り出す。
- ②スタンダードタイプはスイッチ部を取り外す。

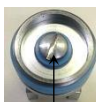

（ネジ）



スイッチ部

※マイナスドライバー等を使い、先端部裏側のネジを反時計回り方向に回してください。

FO タイプはライトカートリッジを取り外す。



ライトカートリッジ

※先端部裏側の突起を持ち、反時計回り方向に回してください。

2) ハンドル

スタンダードタイプ



FO タイプ



タイプ	全長	電源	ライト
スタンダード 2×AA	145 mm	単三乾電池 2 本	—
スタンダード 2×C	150 mm	単二乾電池 2 本	—
スタンダード 2×D	165 mm	単一乾電池 2 本	—
FO 2×AA	160 mm	単三乾電池 2 本	LED
FO 2×C	160 mm	単二乾電池 2 本	LED

※乾電池は付属していません。（別売／アルカリ乾電池推奨）

- 8) 【保守・点検に係る事項】を参照し、洗浄、消毒、滅菌を行う。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・ブレードはハンドルへの装着時に無理な力を加えないこと。また、落したり、ライトガイドを曲げたりしないこと。
- ・超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しない場合は、ハンドルから電池を取りはずして保管すること。
- ・粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- ・保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

[洗浄、消毒、滅菌上の注意]

- 1) 使用後は、洗浄前に必ず電池、電球、スイッチ部、ライトカートリッジを取り外すこと。その後、直ちにブレード、ハンドルの洗浄、消毒を行い、残留物を除去すること。
- 2) 電球、スイッチ部、ライトカートリッジはアルコールで清拭し、液体には浸漬しないこと。
- 3) ウォッシャーディスインフェクターは、上記 1) の部品を取り外した後、機器の取扱説明書に従って使用すること。ただし消毒工程は 95℃を上限とし、熱風乾燥は行わず、乾いた布等で水分を除去すること。
- 4) ブレード、ハンドルはオートクレーブ可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守のこと。
- 5) ブレード、ハンドルの洗浄～滅菌時は以下に注意すること。
 - ・超音波洗浄機は使用しないこと。
 - ・乾熱滅菌、フラッシュ滅菌は不可。
 - ・洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
 - ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・洗剤は中性もしくは酵素系洗剤を使用すること。
 - ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
 - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

[ライト部交換]

ブレードの電球およびライトカートリッジの交換は、部品が完全に冷えていることを確認してから行うこと。

- 1) スタンダードタイプブレード
 - ・真空電球は 20 時間を目安に交換してください。
 - ・別売の真空電球のみを使用してください。
- 2) FO タイプハンドル
 - ・ハンドルに付属のカートリッジは LED 電球を装備していますが、キセノン電球にもカートリッジごと交換可能です。
 - ・キセノン電球カートリッジを使用する場合は、LED に比べて明るさが落ちますのでご注意ください。

[点検]

- ・使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- ・使用前に、ブレードの電球にゆるみがないこと、またブレードとハンドルをセットし正常に点灯することを必ず確認すること。
- ・正常に点灯しない場合は、電池と電球を点検する。
- ・常に予備電球、電池、交換部品を備えておくことを推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Long Life Surgical Industries
(ロングライフ サージカル インダストリーズ)
製造国：パキスタン