

機械器具（64）歯科用探針

一般医療機器 歯科用探針 JMDNコード：35812000

再使用禁止

検診用エキスポローラー

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 本来の目的以外には使用しないこと。
3. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
5. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【有効期間】

包装材に記載の使用期限までに使用すること〔自己認証（製造所データ）による〕。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



全長 165mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

2. 原材料

ハンドル：ABS樹脂

作業部：ステンレススチール

3. 包装

10本/パック

【使用目的又は効果】

歯石や修復部の探査を行うために用いる。

【使用方法等】

本品の先端部を使って、歯石や修復部の探査を行う。

【使用上の注意】

- (1) 本来の目的以外に使用しないこと。
- (2) 本品の使用は DISPOSABLE とし、再使用を禁止する。
- (3) 本品は滅菌済であるため、再滅菌しないこと。
- (4) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。
- (6) 溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- (1) 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- (2) 保管中、損傷しないように注意すること。